



## GEBRAUCHSANWEISUNG

### 3-Kammerbeutel (1000 ml)

Zur Behandlung der Mangelernährung bietet Medipolis ein geeignetes Applikationssystem. Unsere Arzneimittel für die parenterale Ernährung umfassen innovative Mehrkammerbeutelkonzepte (3-Kammerbeutel mit Einzelbausteinen aus Aminosäuren, Elektrolytlösungen, Glukose und Fettemulsionen sowie Mikronährstoffe (Vitamine, Spurenelemente)).

Der 3-Kammerbeutel verfügt über 3 separate Kammern für Aminosäuren <sup>1</sup>, Glukose <sup>2</sup> und Fette <sup>3</sup>.<sup>\*</sup> Die Einzelbausteine werden kurz vor der Verabreichung vermischt, indem die Schienen <sup>4</sup> zur Trennung der Kammern gezogen werden. Die Schiene zwischen den beiden Kammern mit klarer Flüssigkeit wird zuerst entfernt. Danach wird die andere Schiene gezogen. Zum gleichmäßigen Durchmischen muss der Beutel bewegt werden. Erforderliche Mikronährstoffe wie Vitamine und Spurenelemente können kurz vor der Verabreichung hinzugefügt werden.

#### Aussehen vor dem Mischen:


Die Fettemulsion ist eine homogene milchige Flüssigkeit. Die Aminosäuren- und die Glukose-Lösung sind klar und farblos bis hellgelb.

#### Aussehen nach dem Mischen:

Milchige Emulsion zur Infusion.

#### Anschlüsse:

- A** Luer-Lock Adapter zum Befüllen, mit Permanentklemme
- B** Entnahmeport für das Infusionssystem
- C** Port mit synthetischem Septum für sichere Medikamenteninjektion mit Verschlusskappe

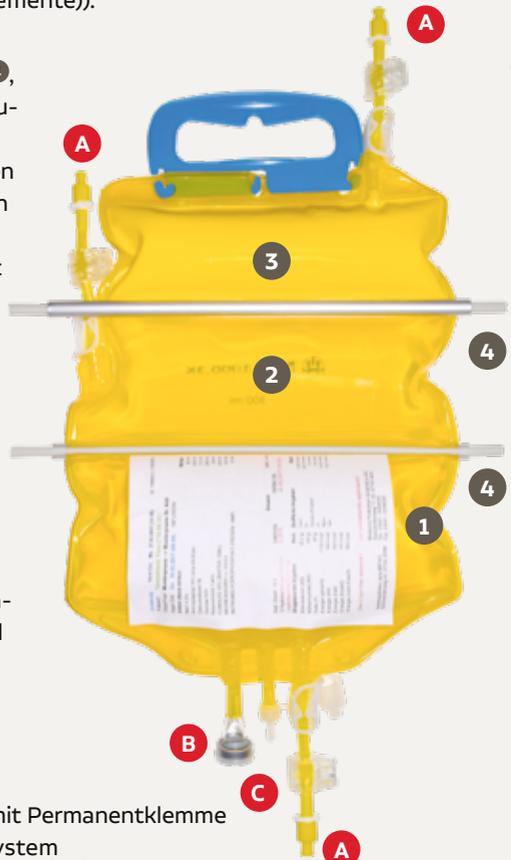

<sup>\*</sup> Je nach Volumen kann die Befüllung der Komponenten in den drei Kammern variieren.

## **Ihr Kontakt zu Medipolis**

### **Medipolis Produktion GmbH**

Otto-Schott-Straße 15

07745 Jena

**TEL** 03641 62840000

### **Medipolis Süd GmbH**

Höhnerweg 2 – 4, Gebäude 103/104

69469 Weinheim

**TEL** 06201 8044810

**E-MAIL** [info@medipolis.de](mailto:info@medipolis.de)

**URL** [www.medipolis.de](http://www.medipolis.de)